

# Tissue-Tek Genie®

## anti-BCL2 Rabbit Monoclonal Antibody [EP36]

### Istruzioni per l'uso

#### Uso previsto

Per uso diagnostico *in vitro*.

Tissue-Tek Genie® anti-BCL2 Rabbit Monoclonal Antibody [EP36] è un anticorpo studiato per il rilevamento qualitativo delle proteine BCL2 in sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina (FPPE) mediante colorazione immunohistochimica (IHC) sul Tissue-Tek Genie® Advanced Staining System. L'interpretazione clinica deve essere effettuata congiuntamente all'esame istologico, alle informazioni cliniche pertinenti, ad altri test diagnostici e a opportuni controlli da parte di un patologo qualificato.

#### Limitazioni

Questo prodotto è stato ottimizzato per l'uso con il protocollo predefinito per questo anticorpo sul Tissue-Tek Genie Advanced Staining System utilizzando

reagenti Tissue-Tek Genie® e sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina (FFPE). La qualità della colorazione potrebbe risultare inferiore se effettuata con altri sistemi e/o reagenti.

Il clone EP36 può anche essere etichettato come nucleolo, ma ciò non deve essere interpretato come un risultato clinicamente positivo.

#### Riepilogo e principio di funzionamento

BCL2 è una proteina di membrana mitocondriale espressa nei tessuti linfonoidali (cellule B nella zona mantellare, aree a cellule T interfollicolari e pochissime cellule nei centri germinativi) e nelle cellule basali dei

tessuti epiteliali. Il gene BCL2 ricopre un ruolo fondamentale nella apoptosi. La proteina BCL2 è iperespressa nei linfomi umani caratterizzati da traslocazioni che giustappongono il gene BCL2 (che si trova in posizione 18q21) con locus della catena pesante dell'immunoglobulina sul cromosoma 14; tali traslocazioni si riscontrano in circa l'85% dei linfomi follicolari umani e nel 20% dei linfomi diffusi a grandi cellule B. L'anticorpo marca la BCL2 sia nelle cellule normali che in quelle neoplastiche. È uno strumento utile per l'identificazione di linfomi follicolari e linfomi diffusi a grandi cellule e per la differenziazione dei linfomi follicolari dai linfonodi reattivi, quando viene utilizzato con un pannello di altri anticorpi.

Tissue-Tek Genie anti-BCL2 Rabbit Monoclonal Antibody [EP36] è un anticorpo primario diretto contro le proteine BCL2 ed è fornito in soluzione salina tamponata contenente l'1% di albumina di siero bovino e lo 0,09% di sodio azide. Le sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina vengono poste su vetrini caricati positivamente e la paraffina viene rimossa utilizzando Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (REF 8865-G001), dopodiché si procede al recupero dell'epitopo mediante calore utilizzando Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744-G001).

La dimostrazione immunohistochimica delle proteine BCL2 in sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina, si ottiene utilizzando Tissue-Tek Genie anti-BCL2 Rabbit Monoclonal Antibody [EP36] e Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826-K250). Questa procedura comporta l'applicazione

sequenziale dell'anticorpo e dei componenti del kit, come segue:

- Tissue-Tek Genie® Protein Block
- Tissue-Tek Genie® anti-BCL2 Rabbit Monoclonal Antibody [EP36]
- Tissue-Tek Genie® Peroxidase Block
- Tissue-Tek Genie® Link (si lega all'anticorpo primario)
- Tissue-Tek Genie® Polymer HRP-Conjugate (si lega al legante)
- Tissue-Tek Genie® DAB Substrate (consente di visualizzare la proteina rilevata)

Quindi si utilizza Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250) per visualizzare i nuclei delle cellule. Il vetrino sottoposto a colorazione immunohistochimica viene montato e la sezione di tessuto FFPE viene esaminata con un microscopio ottico.

## Risultati attesi

La specificità e l'uso previsto di questo anticorpo sono stati validati mediante colorazione immunohistochimica (IHC) sul Tissue-Tek Genie Advanced Staining System utilizzando sezioni di tessuto normale e tumorale fissate in formalina e incluse in paraffina (FFPE).

Questo anticorpo marca la proteina BCL2 nel citoplasma delle cellule B nelle zone mantellari, nelle aree a cellule T interfollicolari e in pochissime cellule nei centri germinativi dei tessuti linfonodali e delle cellule basali dei tessuti epiteliali; può colorare sia le cellule normali che quelle neoplastiche.

La sensibilità e l'identificazione delle proteine BCL2 da parte di questo anticorpo potrebbero essere influenzate da una manipolazione impropria dei campioni. Ciò può alterare l'antigenicità, indebolire l'identificazione e generare risultati falsi negativi.

Pattern di colorazione cellulare: citoplasmatica

Controllo positivo dei campioni: tonsilla

## Precauzioni e avvertenze

Solo per uso professionale. Adottare ragionevoli precauzioni durante la manipolazione. Evitare il contatto dei reagenti con occhi, pelle e mucose.

Indossare guanti e indumenti protettivi e proteggersi gli occhi/il viso.

Le capsule riempite con anticorpo prediluito pronto per l'uso sono esclusivamente monouso. Non tentare di rabboccare o di aggiungere ulteriore reagente. Gettare la capsula dopo l'uso.

Le cartucce riempite con anticorpo prediluito pronto per l'uso sono destinate a più utilizzi. Non tentare di rabboccare o di aggiungere ulteriore reagente. Gettare la cartuccia quando è vuota.

Si raccomanda di includere opportuni controlli su ogni vetrino di campione, per favorire l'identificazione di eventuali deviazioni verificatesi durante il processo di colorazione.

Tutte le pratiche di smaltimento devono essere conformi a tutte le normative e ai regolamenti statali e locali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza (SDS).

## Condizioni di conservazione

Conservare questo prodotto a una temperatura di 2–8 °C.

## Istruzioni per l'uso

Tissue-Tek Genie® anti-BCL2 Rabbit Monoclonal Antibody [EP36], capsule (REF 8459-C010):

1. Collocare nell'area di erogazione reagente (RDA) la Tissue-Tek Genie® Reagent Dispensing Area Tag (RDA-Tag), fissata alla capsula.
2. Spingere la capsula nell'RDA, con il lato di alluminio rivolto verso il basso, e premere la relativa etichetta per inserirla in posizione sopra l'RDA.
3. Posizionare l'RDA sulla stazione desiderata del Tissue-Tek Genie Advanced Staining System.
4. Posizionare il vetrino con la sezione di tessuto sopra la stessa stazione, con il lato della sezione di tessuto rivolto verso il basso.
5. Assegnare il protocollo 8459 alla stessa stazione.
6. Iniziare l'esecuzione del protocollo 8459.
7. All'inizio del processo di colorazione, la targhetta RDA 8459 viene automaticamente scansionata e registrata.

8. Durante la fase di applicazione dell'anticorpo primario, questo viene rilasciato dalla capsula nell'RDA e sulla sezione di tessuto del vetrino.

9. Il protocollo di colorazione procede fino al termine.

Tissue-Tek Genie® anti-BCL2 Rabbit Monoclonal Antibody [EP36], cartuccia (REF 8459-M250):

1. Prima di posizionare la cartuccia sul carosello del Tissue-Tek Genie Advanced Staining System, adescare la cartuccia rivolgendo l'ugello verso il basso e comprimendo delicatamente il tubicino dell'ugello finché non si è riempito di reagente.
2. Posizionare la cartuccia sul carosello.
3. Premere sulla targhetta RDA 8459 per inserirla in posizione sull'RDA.
4. Posizionare l'RDA sulla stazione desiderata del Tissue-Tek Genie Advanced Staining System.
5. Posizionare il vetrino con la sezione di tessuto sopra la stessa stazione, con il lato della sezione di tessuto rivolto verso il basso.
6. Assegnare il protocollo 8459 alla stessa stazione.
7. Iniziare l'esecuzione del protocollo 8459.
8. All'inizio del processo di colorazione, la targhetta RDA 8459 e la cartuccia vengono automaticamente scansionate e registrate.
9. Durante la fase di applicazione dell'anticorpo primario, questo viene erogato dalla cartuccia nell'RDA e sulla sezione di tessuto del vetrino.
10. Il protocollo di colorazione procede fino al termine.

Materiale necessario, ma non fornito

Per la colorazione sono necessari i seguenti reagenti, che non sono forniti:

- Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (REF 8865-G001)
- Tissue-Tek Genie® Wash Solution (REF 8874-G004)
- Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744-G001)
- Tissue-Tek Genie® Non-Immune Rabbit Ig Antibody, Negative Control (REF 8605-C010, 8605-M250)
- Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826-K250)

- Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250)

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web di Sakura Finetek USA all'indirizzo [www.sakuraus.com/Genie](http://www.sakuraus.com/Genie)

## Informazioni per gli ordini

Codice prodotto, nome prodotto e quantità

REF 8459-C010 Tissue-Tek Genie® anti-BCL2 Rabbit Monoclonal Antibody [EP36], pronto per l'uso, 10 capsule; 1 confezione.

REF 8459-M250 Tissue-Tek Genie® anti-BCL2 Rabbit Monoclonal Antibody [EP36], pronto per l'uso, 250 test, 1 cartuccia; 1 unità.

NOTA: la scheda di sicurezza (SDS) è disponibile online sul sito web Sakura Finetek USA all'indirizzo [www.sakuraus.com/SDS.html](http://www.sakuraus.com/SDS.html)

## Bibliografia










1. Sapino A, et al. Histopathology. 2003; 43:354–362.
2. Lebeau A, et al. J Clin Oncol. 2001; 19:354–363.
3. Isola J, et al. Clin Cancer Res. 2004; 10:4793–4798.
4. Todorovic-Rakovic N, et al. Pathol Int. 2005; 55:318–323.
5. Rüschoff J, et al. Mod Pathol. 2012; 25:637–650.
6. Kelly CM and Janjigian YY. J Gastrointest Oncol. 2016; 7:750–762.


## Contatti

I clienti negli Stati Uniti devono contattare Sakura Finetek USA, Inc. al numero verde **1-800-725-8723** oppure contattare il rappresentante autorizzato o il distributore Sakura Finetek.

I clienti negli altri Paesi devono contattare il distributore autorizzato o il rappresentante Sakura Finetek più vicino. I dati di contatto sono reperibili all'indirizzo [www.sakura.com](http://www.sakura.com)

## Simboli

	N. di catalogo
	Cod. lotto
	Dispositivo medico per diagnostica <i>in vitro</i>
	Limitazione di temperatura
	Scadenza
	Produttore
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Conformità europea
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea

Conservazione: 2 °C  8 °C



	Sakura Finetek USA, Inc. 1750 W 214 <sup>th</sup> Street Torrance, CA 90501 Stati Uniti
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Paesi Bassi
Made in U.S.A.	

GS-31911 Rev. B