

Tissue-Tek Genie®

anti-Melanoma Pan Antibody Cocktail [HMB45/EP43/T311]

Istruzioni per l'uso

Uso previsto

Per uso diagnostico *in vitro*.

Tissue-Tek Genie® anti-Melanoma Pan Antibody Cocktail [HMB45/EP43/T311] è un anticorpo studiato per il rilevamento qualitativo delle proteine PMEL17, MART-1 e tirosinasi in sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina (FFPE) mediante colorazione immunostochimica (IHC) sul Tissue-Tek Genie® Advanced Staining System. L'interpretazione clinica deve essere effettuata congiuntamente all'esame istologico, alle informazioni cliniche pertinenti, ad altri test diagnostici e a opportuni controlli da parte di un patologo qualificato.

Limitazioni

Questo prodotto è stato ottimizzato per l'uso con il protocollo predefinito per questo anticorpo sul sistema avanzato di colorazione Tissue-Tek Genie Advanced Staining System reagenti Tissue-Tek Genie® e sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina (FFPE). La qualità della colorazione potrebbe risultare inferiore se effettuata con altri sistemi e/o reagenti.

Riepilogo e principio di funzionamento

PMEL17 (un marker del melanosoma), MART-1 (Melan-A) e la tirosinasi sono proteine espresse nei melanociti normali e sono spesso rilevate nei melanomi. Attraverso la rilevazione di queste proteine tramite rilevazione immunostochimica, il cocktail di anticorpi anti-Melanoma Pan è uno strumento utile per l'identificazione dei melanomi, quando viene utilizzato con un pannello di anticorpi.

The Tissue-Tek Genie anti-Melanoma Pan Antibody Cocktail [HMB45/EP43/T311] è un anticorpo primario contro le proteine umane PMEL17, MART-1 e la tirosinasi e viene fornito in soluzione salina tamponata contenente l'1% di albumina di siero bovino e lo 0,09% di sodio azide. Le sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina (FFPE) vengono posizionate su vetrini caricati positivamente e la paraffina viene rimossa mediante Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (REF 8865-G001), dopodiché si procede al recupero dell'epitopo mediante calore utilizzando Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744-G001).

La dimostrazione immunostochimica delle proteine PMEL17, MART-1 e tirosinasi in sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina, si ottiene utilizzando Tissue-Tek Genie anti-Melanoma Pan Antibody Cocktail [HMB45/EP43/T311] e Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826-K250). Questa procedura comporta l'applicazione sequenziale dell'anticorpo e dei componenti del kit, come segue:

- Tissue-Tek Genie® Protein Block
- Tissue-Tek Genie® anti-Melanoma Pan Antibody Cocktail [HMB45/EP43/T311]
- Tissue-Tek Genie® Peroxidase Block
- Tissue-Tek Genie® Link (si lega all'anticorpo primario)
- Tissue-Tek Genie® Polymer HRP-Conjugate (si lega al legante)

- Tissue-Tek Genie® DAB Substrate (consente di visualizzare la proteina rilevata)

Quindi si utilizza Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250) per visualizzare i nuclei delle cellule. Il vetrino sottoposto a colorazione immunohistochimica viene montato e la sezione di tessuto FFPE viene esaminata con un microscopio ottico.

Risultati attesi

La specificità e l'uso previsto di questo anticorpo sono stati validati mediante colorazione immunohistochimica (IHC) sul Tissue-Tek Genie Advanced Staining System utilizzando sezioni di tessuto normale e tumorale fissate in formalina e incluse in paraffina (FFPE).

Nella cute, si osserva una colorazione citoplasmatica distinta forte con i melanociti nello strato basale dell'epidermide e con le cellule nevice; le cellule epiteliali squamose sono negative. Nella ghiandola surrenale, si osserva una colorazione granulare da debole a moderata delle cellule corticali surrenali in tutte le zone della ghiandola surrenale. Si osserva una colorazione citoplasmatica dei melanomi selettivi.

La sensibilità e l'identificazione delle proteine PMEL17, MART-1 e tirosinasi da parte di questo cocktail di anticorpi potrebbero essere influenzate da una manipolazione impropria dei campioni. Ciò può alterare l'antigenicità, indebolire l'identificazione e generare risultati falsi negativi.

Pattern di colorazione cellulare: citoplasmatica

Tessuto di controllo positivo: cute, melanoma, ghiandola surrenale

Precauzioni e avvertenze

Solo per uso professionale. Adottare ragionevoli precauzioni durante la manipolazione. Evitare il contatto dei reagenti con occhi, pelle e mucose. Indossare guanti e indumenti protettivi e proteggersi gli occhi/il viso.

Le capsule riempite con anticorpo prediluito pronto per l'uso sono esclusivamente monouso. Non tentare di rabboccare o di aggiungere ulteriore reagente. Gettare la capsula dopo l'uso.

Le cartucce riempite con anticorpo prediluito pronto per l'uso sono destinate a più utilizzi. Non tentare di

rabboccare o di aggiungere ulteriore reagente. Gettare la cartuccia quando è vuota.

Si raccomanda di includere opportuni controlli su ogni vetrino di campione, per favorire l'identificazione di eventuali deviazioni verificatesi durante il processo di colorazione.

Tutte le pratiche di smaltimento devono essere conformi a tutte le normative e ai regolamenti statali e locali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza (SDS).

Condizioni di conservazione

Conservare questo prodotto a una temperatura di 2–8 °C.

Istruzioni per l'uso

Tissue-Tek Genie® anti-Melanoma Pan Antibody Cocktail [HMB45/EP43/T311], capsule (REF 8371-C010):

1. Collocare nell'area di erogazione reagente (RDA) la Tissue-Tek Genie® Reagent Dispensing Area Tag (RDA-Tag), fissata alla capsula.
2. Spingere la capsula nell'RDA, con il lato di alluminio rivolto verso il basso, e premere la relativa etichetta per inserirla in posizione sopra l'RDA.
3. Posizionare l'RDA sulla stazione desiderata del Tissue-Tek Genie Advanced Staining System.
4. Posizionare il vetrino con la sezione di tessuto sopra la stessa stazione, con il lato della sezione di tessuto rivolto verso il basso.
5. Assegnare il protocollo 8371 alla stessa stazione.
6. Iniziare l'esecuzione del protocollo 8371.
7. All'inizio del processo di colorazione, la targhetta RDA 8371 viene automaticamente scansionata e registrata.
8. Durante la fase di applicazione dell'anticorpo primario, questo viene rilasciato dalla capsula nell'RDA e sulla sezione di tessuto del vetrino.
9. Il protocollo di colorazione procede fino al termine.

Tissue-Tek Genie® anti-Melanoma Pan Antibody Cocktail [HMB45/EP43/T311], cartuccia (REF 8371-M250):



1. Prima di posizionare la cartuccia sul carosello del Tissue-Tek Genie Advanced Staining System, adescare la cartuccia rivolgendo l'ugello verso il basso e comprimendo delicatamente il tubicino dell'ugello finché non si è riempito di reagente.
2. Posizionare la cartuccia sul carosello.
3. Premere sulla targhetta RDA 8371 per inserirla in posizione sull'RDA.
4. Posizionare l'RDA sulla stazione desiderata del Tissue-Tek Genie Advanced Staining System.
5. Posizionare il vetrino con la sezione di tessuto sopra la stessa stazione, con il lato della sezione di tessuto rivolto verso il basso.
6. Assegnare il protocollo 8371 alla stessa stazione.
7. Iniziare l'esecuzione del protocollo 8371.
8. All'inizio del processo di colorazione, la targhetta RDA 8371 e la cartuccia vengono automaticamente scansionate e registrate.
9. Durante la fase di applicazione dell'anticorpo primario, questo viene erogato dalla cartuccia nell'RDA e sulla sezione di tessuto del vetrino.
10. Il protocollo di colorazione procede fino al termine.

Materiale necessario, ma non fornito

Per la colorazione sono necessari i seguenti reagenti, che non sono forniti:

- Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (REF 8865-G001)
- Tissue-Tek Genie® Wash Solution (REF 8874-G004)
- Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744-G001)
- Tissue-Tek Genie® Non-Immune Rabbit Ig Antibody, Negative Control (REF 8605-C010, 8605-M250)
- Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826-K250)
- Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250)

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web di Sakura Finetek USA all'indirizzo www.sakuraus.com/Genie

Informazioni per gli ordini

Codice prodotto, nome prodotto e quantità

REF 8371-C010 Tissue-Tek Genie® anti-Melanoma Pan Antibody Cocktail [HMB45/EP43/T311], pronto per l'uso, 10 capsule; 1 confezione.

REF 8371-M250 Tissue-Tek Genie® anti-Melanoma Pan Antibody Cocktail [HMB45/EP43/T311], pronto per l'uso, 250 test, 1 cartuccia; 1 unità.

NOTA: la scheda di sicurezza (SDS) è disponibile on-line sul sito web Sakura Finetek USA all'indirizzo www.sakuraus.com/SDS.html

Bibliografia










1. Brichard V, et al. J Exp Med. 1993; 178:489–495.
2. Chen YT, et al. Proc Natl Acad Sci. 1996; 93: 5915–5919.
3. Esclamado RM, et al. Am J Surg. 1986; 152:376–385.
4. Gleason BC, Nascimento AF. Am J Dermatopathol. 2007; 29:22–27.
5. Gown AM, et al. Am J Pathol. 1986 May;123(2): 195–203.
6. Jungbluth AA, et al. Am J Surg Pathol 1998; 22: 595–602.
7. Kapur RP, et al. J Histochem Cytochem. 1992; 40:207–212.
8. Mahmood MD, et al. Mod Pathol 2002; 15:1288–1293.
9. Prieto VG, Shea CR. Arch Pathol Lab Med. 2011; 135:853–859.
10. Robbins PF, et al. Cancer Res. 1994; 54:3124-3126.

Contatti

I clienti negli Stati Uniti devono contattare Sakura Finetek USA, Inc. al numero verde 1-800-725-8723 oppure contattare il rappresentante autorizzato o il distributore Sakura Finetek.

I clienti negli altri Paesi devono contattare il distributore autorizzato o il rappresentante Sakura Finetek più vicino. I dati di contatto sono reperibili all'indirizzo www.sakura.com

Simboli

	N. di catalogo
	Cod. lotto
	Dispositivo medico per diagnostica <i>in vitro</i>
	Limitazione di temperatura
	Scadenza
	Produttore
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Conformità europea
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea

Conservazione: 2 °C  8 °C



	Sakura Finetek USA, Inc. 1750 W 214 th Street Torrance, CA 90501 Stati Uniti
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Paesi Bassi
Made in U.S.A.	

GS-32505 Rev. A