

Tissue-Tek Genie®

anti-Cytokeratin LMW (CK8/18) Antibody Cocktail [EP17/DC10]

Instructions d'utilisation

Utilisation prévue

Utilisation dans le cadre d'un diagnostic *in vitro*.

Le Tissue-Tek Genie® anti-Cytokeratin LMW (CK8/18) Antibody Cocktail [EP17/DC10] est conçu pour la détection qualitative de la protéine cytokératine LMW (CK8/18) dans des coupes d'échantillons fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE) par coloration immunohistochimique (IHC) sur le Tissue-Tek Genie® Advanced Staining System. L'interprétation clinique doit être faite en conjonction avec un examen histologique, des informations cliniques pertinentes, d'autres tests de diagnostic et des contrôles appropriés par un pathologiste qualifié.

Limitations

Ce produit a été optimisé pour une utilisation avec le protocole par défaut pour cet anticorps sur le Tissue-Tek Genie Advanced Staining System, à l'aide de réactifs Tissue-Tek Genie® et de coupes d'échantillons FFPE. La qualité de la coloration peut diminuer en cas d'utilisation avec d'autres systèmes et/ou réactifs.

Résumé et principe

Les cytokératines 8 et 18 sont des cytokératines de bas poids moléculaire (LMW) et sont souvent co-exprimées et comprennent la paire de kératine primaire dans l'épithélium simple, comme on peut le trouver dans le foie et l'intestin. La cyclokératine 18 est également exprimée dans les cellules épithéliales glandulaires et transitionnelles, et le cocktail d'anticorps de cyclokératines 8/18 identifie donc la plupart des épithéliums autres que le type stratifié. Ce cocktail d'anticorps identifie également de nombreuses cellules

tumorales dérivées de l'épithélium et est donc utile pour l'identification/la classification des adénocarcinomes et de la plupart des carcinomes à cellules squameuses lorsqu'il est utilisé avec un ensemble d'anticorps.

Le Tissue-Tek Genie anti-Cytokeratin LMW (CK8/18) Antibody Cocktail [EP17/DC10] est un anticorps primaire dirigé contre la protéine de cytokératine de bas poids moléculaire (CK8/18 humaine). Il est fourni dans une solution saline tamponnée contenant 1 % d'albumine sérique bovine et 0,09 % d'azoture de sodium. Les coupes d'échantillons FFPE sont placées sur des lames chargées positivement et la paraffine est retirée à l'aide de la solution de déparaffinage Tissue-Tek Genie® (REF 8865-G001), après quoi le démasquage par la chaleur des épitopes est effectué à l'aide de la solution de démasquage des antigènes à pH élevé Tissue-Tek Genie® (REF 8744-G001).

La mise en évidence par IHC des protéines de cytokératine de bas poids moléculaire dans des coupes d'échantillons FFPE est obtenue en utilisant le Tissue-Tek Genie anti-Cytokeratin LMW (CK8/18) Antibody Cocktail [EP17/DC10] et le Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826-K250). Cette procédure implique l'application séquentielle d'anticorps et de composants du kit comme suit :

- Tissue-Tek Genie® Protein Block
- Tissue-Tek Genie® anti-Cytokeratin LMW (CK8/18) Antibody Cocktail [EP17/DC10]
- Tissue-Tek Genie® Peroxidase Block
- Tissue-Tek Genie® Link (se lie à l'anticorps primaire)

- Tissue-Tek Genie® Polymer HRP-Conjugate (se lie au lien)
- Tissue-Tek Genie® DAB Substrate (visualise la protéine détectée)

La Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250) est ensuite utilisée pour visualiser les noyaux des cellules. La lame colorée par IHC est recouverte et la coupe d'échantillon FFPE est examinée à l'aide d'un microscope optique.

Résultats attendus

La spécificité et l'utilisation prévue de cet anticorps ont été validées par le biais d'une coloration IHC sur le Tissue-Tek Genie Advanced Staining System au moyen de coupes d'échantillon FFPE de cellules normales et tumorales.

Dans le foie, une coloration cytoplasmique est observée avec les cellules épithéliales de la voie biliaire principale, tandis que les hépatocytes présentent une coloration membranaire. Pour ces derniers, la coloration peut être hétérogène, avec la coloration la plus forte dans les zones périportales. Les cellules de Küpffer sont négatives. Dans l'œsophage, une coloration cytoplasmique est observée dans les cellules basales épithéliales squameuses, avec une coloration plus faible observée dans les cellules épithéliales squameuses intermédiaires dispersées. Une coloration cytoplasmique des cellules néoplasiques est observée dans l'adénocarcinome du côlon, le carcinome canalaire du sein, l'hypernéphrome, le carcinome hépatocellulaire et le carcinome pulmonaire à petites cellules.

La sensibilité et l'identification des protéines de cytokératine de bas poids moléculaire (CK8/18) par ce cocktail d'anticorps peuvent être affectées par une mauvaise manipulation des tissus. Cela peut altérer l'antigénicité, affaiblir la détection et générer de faux résultats négatifs.

Modèle de coloration cellulaire : cytoplasmique et parfois membranaire

Échantillon témoin positif : foie, tractus gastro-intestinal, œsophage et tumeurs connues positives à la cytokératine de bas poids moléculaire (CK8/18)

Mises en garde et avertissements

Réservé à un usage professionnel. Prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation. Éviter

tout contact des réactifs avec les yeux, la peau et les muqueuses. Porter des gants et des vêtements de protection, ainsi qu'une protection des yeux/du visage.

Les capsules remplies d'anticorps pré-dilués prêts à l'emploi sont à usage unique. Ne pas essayer de les remplir ou d'ajouter du réactif. Jeter la capsule après utilisation.

Les cartouches remplies d'anticorps pré-dilués prêts à l'emploi sont destinées à des utilisations multiples. Ne pas essayer de les remplir ou d'ajouter du réactif. Jeter la cartouche lorsqu'elle est vide.

Il est recommandé d'inclure des témoins appropriés sur chaque lame d'échantillon pour faciliter l'identification de tout écart susceptible de se produire pendant le processus de coloration.

Toutes les pratiques de mise au rebut doivent être conformes à l'ensemble des lois et des réglementations fédérales, régionales et locales. Reportez-vous à la FDS pour plus d'informations.

Conditions de stockage

Conservez ce produit à une température comprise entre 2 et 8 °C.

Instructions d'utilisation

Tissue-Tek Genie® anti-Cytokeratin LMW (CK8/18) Antibody Cocktail [EP17/DC10], capsules (REF 8298-C010) :

1. Attachez la Tissue-Tek Genie® Reagent Dispensing Area Tag (RDA-Tag) sur la capsule dans la RDA.
2. Poussez la capsule dans la RDA avec le côté film vers le bas et clipsez la plaque RDA attachée pour la mettre en place sur la RDA.
3. Placez la RDA sur la station souhaitée du Tissue-Tek Genie Advanced Staining System.
4. Placez la lame avec la coupe d'échantillon sur la même station, côté coupe d'échantillon vers le bas.
5. Attribuez le protocole 8298 à la même station.
6. Lancez l'exécution du protocole 8298.
7. La plaque RDA 8298 sera scannée et enregistrée automatiquement lorsque le processus de coloration sera lancé.

8. Au cours de l'étape d'application de l'anticorps primaire, l'anticorps sera libéré de la capsule dans la RDA et sur la coupe d'échantillon de la lame.
9. Le protocole de coloration continue jusqu'à la fin.

Tissue-Tek Genie® anti-Cytokeratin LMW (CK8/18) Antibody Cocktail [EP17/DC10], cartouche (REF 8298-M250) :

1. Avant de placer la cartouche sur le carrousel du Tissue-Tek Genie Advanced Staining System, amorcez la cartouche en orientant la buse vers le bas et en pinçant doucement la tubulure de la buse jusqu'à ce qu'elle soit remplie de réactif.
2. Placez la cartouche sur le carrousel.
3. Clipsez la plaque RDA 8298 pour la mettre en place sur la RDA.
4. Placez la RDA sur la station souhaitée du Tissue-Tek Genie Advanced Staining System.
5. Placez la lame avec la coupe d'échantillon sur la même station, côté coupe d'échantillon vers le bas.
6. Attribuez le protocole 8298 à la même station.
7. Lancez l'exécution du protocole 8298.
8. La plaque RDA 8298 et la cartouche seront scannées et enregistrées automatiquement lorsque le processus de coloration sera lancé.
9. Au cours de l'étape d'application de l'anticorps primaire, l'anticorps sera distribué de la cartouche dans la RDA et sur la coupe d'échantillon de la lame.
10. Le protocole de coloration continue jusqu'à la fin.

Matériel requis, mais non fourni

Les réactifs suivants peuvent être nécessaires pour la coloration, mais ne sont pas fournis :

- Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (REF 8865-G001)
- Tissue-Tek Genie® Wash Solution (REF 8874-G004)
- Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744-G001)
- Tissue-Tek Genie® Non-Immune Rabbit Ig Antibody, Negative Control (REF 8605-C010, 8605-M250)

- Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826-K250)
- Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250)

Vous trouverez de plus amples informations sur le site web de Sakura Finetek USA à l'adresse www.sakuraus.com/Genie.

Informations relatives à la commande

Code produit, nom du produit et quantité (REF 8298-C010) Tissue-Tek Genie® anti-Cytokeratin LMW (CK8/18) Antibody Cocktail [EP17/DC10], prêt à l'emploi, 10 capsules ; 1 paquet.

(REF 8298-M250) Tissue-Tek Genie® anti-Cytokeratin LMW (CK8/18) Antibody Cocktail [EP17/DC10], prêt à l'emploi, 250 tests, 1 cartouche ; 1 unité.

REMARQUE : La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible en ligne sur le site web de Sakura Finetek USA à l'adresse www.sakuraus.com/SDS.html.

Références










1. Wang PH. Oral Oncol. 2011; 47:775.
2. Ordonez NG. Hum Pathol. 2013; 44:1195-1215.
3. Abd El-Rehim DH, et al. J Pathol 2004; 203:661-671.
4. Oshima RG, et al. Cancer Metastasis Rev. 1996; 15:445--471.
5. Nagashio R, et al. Pathol Int. 2010; 60:71-77.


Contact

Pour les États-Unis, contacter Sakura Finetek USA, Inc. en appelant gratuitement le 1-800-725-8723 ou contacter un représentant ou distributeur agréé Sakura Finetek.

En dehors des États-Unis, contactez le représentant ou distributeur agréé Sakura Finetek le plus proche. Les coordonnées sont précisées sur le site www.sakura.com.

Symboles

	Numéro de catalogue
	Code de lot
	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Limitation de température
	Utilisé par
	Fabricant
	Consultez les instructions d'utilisation
	Conformité européenne
	Représentant agréé dans la Communauté européenne

Stockage : 2 °C  8 °C



	Sakura Finetek USA, Inc. 1750 W 214 th Street Torrance, CA 90501 U.S.A.
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Pays-Bas
Fabriqué aux États-Unis	

GS-32523 Rév. A