

Tissue-Tek Genie® anti-Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit Polyclonal Antibody

Gebrauchsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zur Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik.

Der Tissue-Tek Genie® anti-Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit Polyclonal Antibody wurde für die qualitative Feststellung des Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)-Proteins in formalinfixierten, paraffineingebetteten (Formalin-Fixed, Paraffin Embedded, FFPE) Gewebeschnitten von Gewebeproben mithilfe immunhistochemischer Färbung (IHC) unter Verwendung des Tissue-Tek Genie® Advanced Staining System entwickelt. Die klinische Interpretation muss in Verbindung mit einer histologischen Untersuchung, unter Berücksichtigung klinischer Informationen, anderer diagnostischer Tests sowie der Überprüfung der entsprechenden Kontrollmechanismen durch einen qualifizierten Pathologen erfolgen.

Einschränkungen

Dieses Produkt ist optimiert für die Verwendung gemäß Standardprotokoll für diesen Antikörper auf dem Tissue-Tek Genie Advanced Staining System und die Verwendung von Tissue-Tek Genie® Reagenzien und FFPE-Gewebeschnitten. Die Färbequalität kann bei der Verwendung mit anderen Systemen und/oder Reagenzien gemindert sein.

Dieses Produkt ist in den USA nicht verfügbar

Zusammenfassung und Prinzip

Der Herpes Simplex Virus wird in zwei Typen unterteilt: Herpes Simplex Virus Typ 1 (HSV1) und Herpes Simplex Virus Typ 2 (HSV2). HSV1 und HSV2 gehören zur Familie der Herpesviridae. HSV ist ein beim Menschen sehr verbreiteter Erreger von

Hautinfektionen, der eine lebenslang anhaltende Infektion der Neuronen der sensorischen und autonomen Ganglien hervorruft. HSV verursacht Infektionen, die von leichter Stomatitis bis hin zu verbreiteter und fetaler Erkrankung reicht. Die klinischen Befunde in Zusammenhang mit einer HSV-Infektion umfassen Gingivostomatitis, Keratitis, Enzephalitis, bläschenartige Hautausschläge, aseptische Meningitis, neonatale Herpes, Infektionen des Genitaltraktes und Primärinfektionen. HSV Typ 1 steht im engen Zusammenhang mit Infektion der Lippen, wobei auch Infektionen der Genitalien in bestimmten Populationen verbreitet sind. Der anti (HSV1) Antikörper ist nützlich zur Feststellung des Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Protein in menschlichen Geweben.

Der Tissue-Tek Genie anti-Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit Polyclonal Antibody ist ein primärer Antikörper gegen Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Proteine und wird in gepufferter Salzlösung mit 1 % Rinderserumalbumin und 0,09 % Natriumazid bereitgestellt. FFPE-Gewebeschnitte werden auf positiv geladenen Objektträgern platziert und mithilfe der Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (h8865) entparaffiniert. Danach erfolgt eine hitze-induzierte Epitop-Demaskierung mittels Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744).

Der immunhistochemische (IHC) Nachweis von Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)-Proteinen in FFPE-Gewebeschnitten erfolgt durch die Anwendung von Tissue-Tek Genie anti-Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit Polyclonal Antibody und dem Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826). Dieses Verfahren umfasst das sequentielle Aufbringen der Antikörper und der Bestandteile des Kits wie im Folgenden dargelegt:

- Tissue-Tek Genie® Protein Block
- Tissue-Tek Genie® anti-Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit Polyclonal Antibody
- Tissue-Tek Genie® Peroxidase Block
- Tissue-Tek Genie® Link (bindet an den primären Antikörper)
- Tissue-Tek Genie® Polymer HRP-Conjugate (bindet an das Link-Reagenz)
- Tissue-Tek Genie® DAB Substrate (zur Visualisierung von detektierten Proteinen)

Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830) dient anschließend zur Visualisierung der Zellkerne. Der immunhistochemisch gefärbte Objektträger wird mit Folie eingedeckt, und der FFPE-Gewebeschnitt wird unter dem Lichtmikroskop untersucht.

Erwartete Ergebnisse

Spezifität und Verwendungszweck dieses Antikörpers wurden mittels IHC-Färbung unter Verwendung des Tissue-Tek Genie Advanced Staining System mit FFPE-Gewebeschnitten von normalem und Tumor-Gewebe validiert.

Zytoplasmatische und Zellkern-Färbung von HSV1-infizierten Zellen wurde beobachtet. Zytoplasmatische und Zellkern-Färbung wurde nicht beobachtet bei normalen und neoplastischen menschlichen Zellen, CMV-positiven Geweben und HHV8-positiven Geweben.

Die Testempfindlichkeit und Identifikation des HSV1-Proteins durch diesen Antikörper kann durch unsachgemäße Handhabung der Gewebeprobe beeinflusst werden. Dies kann eine Veränderung der Antigenität bewirken, die Erkennung schwächen und zu falsch negativen Diagnosen führen.

Zelluläres Färbemuster: zytoplasmatisch und Zellkern
Positive Gewebe-Kontrolle: HSV1-infizierte Gewebe

Vorsichts- und Warnhinweise

Nur für den professionellen Einsatz. Treffen Sie bei der Handhabung die entsprechenden, angemessenen Vorkehrungen. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen dem Reagenz und den Augen, der Haut und den Schleimhäuten. Tragen Sie Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz.

Kapseln mit gebrauchsfertigen, vorverdünnten Antikörpern zum Einmalgebrauch. Versuchen Sie nicht, diese neu zu befüllen oder zusätzliche Reagenzien hinzuzufügen. Kapsel nach Gebrauch entsorgen.

Kartuschen mit gebrauchsfertigen, vorverdünnten Antikörpern können für mehrere Anwendungen genutzt werden. Versuchen Sie nicht, diese neu zu befüllen oder zusätzliche Reagenzien hinzuzufügen. Kartusche entsorgen, wenn sie leer ist.

Es wird empfohlen, angemessene Kontrollen auf jedem Gewebeprobe-Objektträger vorzusehen, um die Erkennung jeglicher Abweichungen zu unterstützen, die im Verlauf des Färbeprozesses auftreten könnten.

Alle Entsorgungsverfahren müssen sämtliche geltenden föderalen, staatlichen und örtlichen Vorschriften erfüllen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (Safety Datasheet, SDS).

Lagerbedingungen

Dieses Produkt ist bei 2 bis 8 °C aufzubewahren.

Gebrauchsanleitung

Tissue-Tek Genie® anti-Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit Polyclonal Antibody, Kapseln (REF 8365-C010):

1. Legen Sie das an der Kapsel angebrachte Tissue-Tek Genie® Reagent Dispenser Area Tag (RDA-Tag) in den Dispenser.
2. Drücken Sie die Kapsel mit der Folienseite nach unten in den Dispenser und klicken Sie das befestigte RDA-Tag nach unten in den Dispenser.
3. Platzieren Sie den Dispenser auf der gewünschten Station des Tissue-Tek Advanced Staining System.
4. Platzieren Sie den Objektträger mit dem Gewebeschnitt nach unten auf derselben Station.
5. Weisen Sie dieser Station Protokoll 8365 zu.
6. Starten Sie die Ausführung von Protokoll 8365.
7. Wenn der Färbeprozess beginnt, wird die Dispenser-Halterung 8365 automatisch registriert und gescannt.
8. Während des Auftragens des primären Antikörpers wird der Antikörper aus der Kapsel in

den Dispenser freigesetzt und auf den Gewebeschnitt am Objektträger aufgetragen.

9. Das Färbeprotokoll wird bis zum Ende ausgeführt.

Tissue-Tek Genie® anti-Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit Polyclonal Antibody, Kartusche (REF 8365-M250):

1. Bevor Sie die Kartusche im Karussell des Tissue-Tek Genie Advanced Staining System platzieren, bereiten Sie die Kartusche vor, indem Sie sie mit der Düse nach unten ausrichten und vorsichtig auf den Düsenschlauch drücken, bis der Schlauch mit dem Reagenz gefüllt ist.
2. Platzieren Sie die Kartusche am Karussell.
3. Klicken Sie die Dispenser-Halterung 8365 in den Dispenser.
4. Platzieren Sie den Dispenser auf der gewünschten Station des Tissue-Tek Advanced Staining System.
5. Platzieren Sie den Objektträger mit dem Gewebeschnitt nach unten auf derselben Station.
6. Weisen Sie dieser Station Protokoll 8365 zu.
7. Starten Sie die Ausführung von Protokoll 8365.
8. Wenn der Färbeprozess beginnt, werden die Dispenser-Halterung 8365 und die Kartusche automatisch registriert und gescannt.
9. Während des Auftrags des primären Antikörpers wird der Antikörper aus der Kartusche in den Dispenser abgegeben und auf den Gewebeschnitt am Objektträger aufgetragen.
10. Das Färbeprotokoll wird bis zum Ende ausgeführt.

Benötigte, aber nicht mitgelieferte Materialien

Die folgenden Reagenzien können für die Färbung erforderlich sein, werden jedoch nicht mitgeliefert:

- Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (REF 8865), Entparaffinierungslösung
- Tissue-Tek Genie® Wash Solution (REF 8874), Waschlösung
- Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744) Antigen-Demaskierungslösung mit hohem pH-Wert
- Tissue-Tek Genie® Non-Immune Rabbit Ig Antibody, Negativkontrolle (REF 8605)

- Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826)
- Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830)

Weitere Informationen finden Sie auf der US-amerikanischen Website von Sakura Finetek unter www.sakuraus.com/Genie

Bestellinformationen

Artikelnummer Produktbezeichnung und Menge

REF 8365-C010 Tissue-Tek Genie® anti-Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit Polyclonal Antibody, gebrauchsfertig, 10 Kapseln, 1 Packung.

REF 8365-M250 Tissue-Tek Genie® anti-Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit Polyclonal Antibody, gebrauchsfertig, 250 Tests, 1 Kartusche, 1 Einheit.

HINWEIS: Das Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet, SDS) ist online auf der US-amerikanischen Website von Sakura Finetek verfügbar unter www.sakuraus.com/SDS.html

Literatur










1. Troxell ML, Lanciault C. Arch Pathol Lab Med. 2016; 140:910-925.
2. Strickler JG, et al. Hum Pathol. 1990; 21:443-448.

Kontakt

In den Vereinigten Staaten können Sie Sakura Finetek USA unter der Telefonnummer 1-800-725-8723 kostenlos anrufen oder Ihren Sakura Finetek Außendienstmitarbeiter oder autorisierten Händler kontaktieren.

Außerhalb der Vereinigten Staaten wenden Sie sich bitte an den nächsten Sakura Finetek-Außendienstmitarbeiter oder autorisierten Händler. Die genauen Kontaktinformationen finden Sie unter www.sakura.com

Symbole

-  Katalognummer
-  Chargen-Code
-  Medizinprodukt für die *in-vitro*-Diagnostik
-  Temperaturbegrenzung
-  Haltbarkeitsdatum
-  Hersteller
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Europäische Konformität
-  Autorisierter Vertreter in der Europäischen Union

Lagerung: 2 °C  8 °C



	Sakura Finetek USA, Inc. 1750 W 214 th Street Torrance, CA 90501 USA
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a Die Niederlande
Made in USA	

GS-33049 Rev.A