

# Tissue-Tek Genie®

## anti-Prostein Rabbit Monoclonal Antibody [ZR9]

### Istruzioni per l'uso

#### Uso previsto

Per uso diagnostico *in vitro*.

Tissue-Tek Genie® anti-Prostein Rabbit Monoclonal Antibody [ZR9] è un anticorpo studiato per la ricerca qualitativa della proteina umana prosteina in sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina (FFPE) mediante colorazione immunohistochimica (IHC) sul sistema avanzato di colorazione immunohistochimica Tissue-Tek Genie®. L'interpretazione clinica deve essere effettuata congiuntamente all'esame istologico, alle informazioni cliniche pertinenti, ad altri test diagnostici e a opportuni controlli da parte di un patologo qualificato.

#### Limitazioni

Questo prodotto è stato ottimizzato per l'uso con il protocollo predefinito per questo anticorpo sul sistema avanzato di colorazione immunohistochimica Tissue-Tek Genie®, utilizzando reagenti Tissue-Tek Genie® e sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina (FFPE). La qualità della colorazione potrebbe risultare inferiore se effettuata con altri sistemi e/o reagenti.

#### Riepilogo e principio di funzionamento

La prosteina, nota anche come P501S, è espressa nella maggior parte dei tessuti prostatici normali e maligni. La prosteina è localizzata nel complesso di Golgi e presenta un pattern di colorazione citoplasmatica perinucleare. La prosteina è un marcatore specifico della prostata e non è stata rilevata in nessun altro tessuto normale o maligno. Utilizzato in un pannello con altri anticorpi, l'anticorpo anti-prosteina è utile per contribuire all'identificazione dei carcinomi prostatici.

Tissue-Tek Genie anti-Prostein Rabbit Monoclonal Antibody [ZR9] è un anticorpo primario diretto contro la proteina umana prosteina ed è fornito in soluzione salina tamponata contenente l'1% di albumina di siero bovino e lo 0,09% di sodio azide. Le sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina vengono poste su vetrini caricati positivamente e la paraffina viene rimossa utilizzando la soluzione sparaffinante Tissue-Tek Genie® (REF 8865-G001), dopodiché si procede al recupero dell'epitopo mediante calore utilizzando la soluzione di recupero dell'antigene a pH elevato Tissue-Tek Genie® (REF 8744-G001).

La dimostrazione immunohistochimica della proteina umana prosteina in sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina si ottiene utilizzando Tissue-Tek Genie anti-Prostein Rabbit Monoclonal Antibody [ZR9] e il kit di rilevamento *professionale* Tissue-Tek Genie®, DAB (REF 8826-K250). Questa procedura comporta l'applicazione sequenziale dell'anticorpo e dei componenti del kit come segue:

- Blocco proteico Tissue-Tek Genie®
- Tissue-Tek Genie® anti-Prostein Rabbit Monoclonal Antibody [ZR9]
- Blocco perossidasi Tissue-Tek Genie®
- Legante Tissue-Tek Genie® (si lega all'anticorpo primario)
- Polimero coniugato con HRP Tissue-Tek Genie® (si lega al legante)
- Substrato DAB Tissue-Tek Genie® (consente di visualizzare la proteina rilevata)

Quindi si utilizza l'ematosilina Tissue-Tek Genie® (REF 8830-M250) per visualizzare i nuclei delle cellule. Il vetrino sottoposto a colorazione immunohistochimica

viene montato e la sezione di tessuto FFPE viene esaminata con un microscopio ottico.

## Risultati attesi

La specificità e l'uso previsto di questo anticorpo sono stati validati mediante colorazione immunostochimica, utilizzando il sistema avanzato di colorazione immunostochimica Tissue-Tek Genie su sezioni di tessuto normale e tumorale fissate in formalina e incluse in paraffina.

Si osserva una colorazione citoplasmatica granulare delle cellule epiteliali della prostata e dell'iperplasia prostatica benigna. Non si osserva alcuna colorazione positiva in altri tessuti normali. Si osserva una colorazione granulare citoplasmatica delle cellule neoplastiche dell'adenocarcinoma prostatico. Non si osserva alcuna colorazione positiva in altri tumori.

La sensibilità e l'identificazione della proteina umana prosteina da parte di questo anticorpo potrebbero essere influenzate da una manipolazione impropria dei campioni. Ciò può alterare l'antigenicità, indebolire l'identificazione e generare risultati falsi negativi.

Pattern di colorazione cellulare: citoplasmatica granulare

Controllo positivo dei campioni: prostata e cancro alla prostata

## Precauzioni e avvertenze

Solo per uso professionale. Adottare ragionevoli precauzioni durante la manipolazione. Evitare il contatto dei reagenti con occhi, pelle e mucose. Indossare guanti e indumenti protettivi e protezioni per gli occhi/il viso.

Le capsule riempite con anticorpo prediluito pronto per l'uso sono esclusivamente monouso. Non tentare di riempirle di nuovo o di aggiungere ulteriore reagente. Gettare la capsula dopo l'uso.

Le cartucce riempite con anticorpo prediluito pronto per l'uso sono destinate a più utilizzi. Non tentare di riempirle di nuovo o di aggiungere ulteriore reagente. Gettare la cartuccia quando è vuota.

Si raccomanda di applicare opportuni controlli su ogni vetrino di campione, per favorire l'identificazione di eventuali deviazioni verificatesi durante il processo di colorazione.

Tutte le pratiche di smaltimento devono essere conformi a tutte le normative e ai regolamenti statali e locali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza (SDS).

## Condizioni di stoccaggio

Conservare questo prodotto a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C.

## Istruzioni per l'uso

Tissue-Tek Genie® anti-Prostein Rabbit Monoclonal Antibody [ZR9], capsule (REF 8519-C010):

1. Collocare nell'area di erogazione reagente (RDA) la targhetta per l'area di erogazione reagente (targhetta RDA) Tissue-Tek Genie® fissata alla capsula.
  2. Spingere la capsula nell'RDA, con il lato di alluminio rivolto verso il basso, e premere la relativa targhetta per inserirla in posizione sopra l'RDA.
  3. Posizionare l'RDA sulla stazione desiderata del sistema avanzato di colorazione immunostochimica Tissue-Tek Genie.
  4. Posizionare il vetrino con la sezione di tessuto sopra la stessa stazione, con il lato della sezione di tessuto rivolto verso il basso.
  5. Assegnare il protocollo 8519 alla stessa stazione.
  6. Iniziare l'esecuzione del protocollo 8519.
  7. All'inizio del processo di colorazione, la targhetta RDA 8519 viene automaticamente scansionata e registrata.
  8. Durante la fase di applicazione dell'anticorpo primario, questo viene rilasciato dalla capsula nell'RDA e sulla sezione di tessuto sul vetrino.
  9. Il protocollo di colorazione procede fino al termine.
- Tissue-Tek Genie® anti-Prostein Rabbit Monoclonal Antibody [ZR9], cartuccia (REF 8519-M250):

1. Prima di posizionare la cartuccia sul carosello del sistema avanzato di colorazione immunostochimica Tissue-Tek Genie, adescare la cartuccia rivolgendo l'ugello verso il basso e comprimendo delicatamente il tubicino dell'ugello finché non si è riempito di reagente.
2. Posizionare la cartuccia sul carosello.



3. Premere la targhetta RDA 8519 per inserirla in posizione sull'RDA.
4. Posizionare l'RDA sulla stazione desiderata del sistema avanzato di colorazione immunostochimica Tissue-Tek Genie.
5. Posizionare il vetrino con la sezione di tessuto sopra la stessa stazione, con il lato della sezione di tessuto rivolto verso il basso.
6. Assegnare il protocollo 8519 alla stessa stazione.
7. Iniziare l'esecuzione del protocollo 8519.
8. All'inizio del processo di colorazione, la targhetta RDA 8519 e la cartuccia vengono automaticamente scansionate e registrate.
9. Durante la fase di applicazione dell'anticorpo primario, questo viene erogato dalla cartuccia nell'RDA e sulla sezione di tessuto del vetrino.
10. Il protocollo di colorazione procede fino al termine.

Materiale necessario, ma non fornito

Per la colorazione sono necessari i seguenti reagenti, che non sono forniti:

- Soluzione sparaffinante per Tissue-Tek Genie® (REF 8865-G001)
- Soluzione di lavaggio Tissue-Tek Genie® (REF 8874-G004)
- Soluzione di recupero dell'antigene a pH elevato Tissue-Tek Genie® (REF 8744-G001)
- Tissue-Tek Genie® Non-Immune Rabbit Ig Antibody, controllo negativo (REF 8605-C010, 8605-M250)
- Kit di rilevamento *professionale* Tissue-Tek Genie®, DAB (REF 8826-K250)
- Ematossilina Tissue-Tek Genie® (REF 8830-M250)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web Sakura Finetek USA all'indirizzo [www.sakuraus.com/Genie](http://www.sakuraus.com/Genie)

## Informazioni per gli ordini

Codice prodotto, nome prodotto e quantità

REF 8519-C010 Tissue-Tek Genie® anti-Prostein Rabbit Monoclonal Antibody [ZR9], pronto per l'uso, 10 capsule; 1 confezione.

REF 8519-M250 Tissue-Tek Genie® anti-Prostein Rabbit Monoclonal Antibody [ZR9], pronto per l'uso, 250 test, 1 cartuccia; 1 unità.

NOTA: La scheda di sicurezza (SDS) è disponibile online sul sito web Sakura Finetek USA all'indirizzo [www.sakuraus.com/SDS.html](http://www.sakuraus.com/SDS.html)

## Bibliografia










1. Xu J. et al. Cancer Res. 2001; 61:1563-1568.
2. Kalos M. et al. Prostate. 2004; 60:246-256.
3. Sheridan T. et al. Am. J. Surg. Pathol. 2007; 31:1351-1355.
4. Chuang A.Y. et al. Am. J. Surg. Pathol. 2007; 31:1246-1255.
5. Osunkoya A.O. et al. Hum. Pathol. 2007; 38:1836-1841.
6. Yin M. et al. Diagn. Pathol. 2007; 2:41.
7. Wilkerson M.L. et al. Arch. Pathol. Lab. Med. 2014; 138:1643-1665.
8. Epstein J.I. et al. Am. J. Surg. Pathol. 2014; 38:e6-e19.
9. Oh W.J. et al. J. Pathol. and Translational Medicine. 2016; 50:345-354.

## Contatti

I clienti negli Stati Uniti possono contattare Sakura Finetek USA, Inc. al numero verde **1-800-725-8723** oppure contattare il rappresentante o il distributore autorizzato Sakura Finetek.

I clienti negli altri Paesi possono contattare il distributore autorizzato o il rappresentante Sakura Finetek più vicino. Le informazioni di contatto sono reperibili all'indirizzo [www.sakura.com](http://www.sakura.com)

## Simboli

	N. di catalogo
	Cod. lotto
	Dispositivo medico per diagnostica <i>in vitro</i>
	Limiti di temperatura
	Scadenza
	Produttore
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Conformità europea
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea

Conservazione: 2 °C  8 °C



	Sakura Finetek USA, Inc. 1750 W 214 <sup>th</sup> Street Torrance, CA 90501 Stati Uniti
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Paesi Bassi
Fabbricato negli Stati Uniti	

GS-33229 Rev. A