

# Tissue-Tek Genie®

## anti-TIA-1 Mouse Monoclonal Antibody [2G9A10F5]

### Instructions d'utilisation

#### Utilisation prévue

Utilisation dans le cadre d'un diagnostic *in vitro*.

Le Tissue-Tek Genie® anti-TIA-1 Mouse Monoclonal Antibody [2G9A10F5] est un anticorps conçu pour la détection qualitative des protéines TIA-1 dans des coupes d'échantillons fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE) par coloration immunohistochimique (IHC) sur le Tissue-Tek Genie® Advanced Staining System. L'interprétation clinique doit être faite en conjonction avec un examen histologique, des informations cliniques pertinentes, d'autres tests de diagnostic et des contrôles appropriés par un pathologiste qualifié.

#### Limitations

Ce produit a été optimisé pour une utilisation avec le protocole par défaut pour cet anticorps sur le Tissue-Tek Genie Advanced Staining System, à l'aide de réactifs Tissue-Tek Genie® et de coupes d'échantillons FFPE. La qualité de la coloration peut diminuer en cas d'utilisation avec d'autres systèmes et/ou réactifs.

#### Résumé et principe

L'antigène intracellulaire 1 à reconnaissance restreinte aux lymphocytes T (TIA1) est une protéine associée aux granules cytotoxiques qui est exprimée par les lymphocytes T cytotoxiques (CTL) actifs et non actifs, les cellules tueuses naturelles (NK) et les thymocytes actifs, mais pas par les lymphocytes B. L'expression du TIA-1 se trouve dans les néoplasmes à cellules T ou NK. Le TIA-1 est exprimé dans une large gamme de lymphomes T. Les lymphomes à cellules NK de type nasal expriment généralement le TIA-1. Environ 75 %

des lymphomes anaplasiques à grandes cellules (ALCL), quelques cas de leucémies à tricholeucocytes et quelques cas de lymphomes de Hodgkin classiques expriment le TIA-1. L'anticorps anti-TIA-1 est utile pour le diagnostic du lymphome T, y compris les lymphomes à lymphocytes T cytotoxiques (CTL) et à cellules NK, les ALCL, les lymphomes à cellules NK de type nasal et les leucémies à tricholeucocytes lorsqu'il est utilisé dans un ensemble avec d'autres anticorps.

Le Tissue-Tek Genie anti-TIA-1 Mouse Monoclonal Antibody [2G9A10F5] est un anticorps primaire dirigé contre la protéine TIA-1 humaine. Il est fourni dans une solution saline tamponnée contenant 1 % d'albumine sérique bovine et 0,09 % d'azoture de sodium. Les coupes d'échantillons FFPE sont placées sur des lames chargées positivement et la paraffine est retirée à l'aide de la Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (REF 8865-G001), après quoi le démasquage par la chaleur des épitopes est effectué à l'aide de la Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744-G001).

La mise en évidence par IHC des protéines TIA-1 dans des coupes d'échantillons FFPE est obtenue en utilisant le Tissue-Tek Genie anti-TIA-1 Mouse Monoclonal Antibody [2G9A10F5] et le Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826-K250). Cette procédure implique l'application séquentielle d'anticorps et de composants du kit comme suit :

- Tissue-Tek Genie® Protein Block
- Tissue-Tek Genie® anti-TIA-1 Mouse Monoclonal Antibody [2G9A10F5]
- Tissue-Tek Genie® Peroxidase Block
- Tissue-Tek Genie® Link (se lie à l'anticorps primaire)

- Tissue-Tek Genie® Polymer HRP-Conjugate (se lie au lien)
- Tissue-Tek Genie® DAB Substrate (visualise la protéine détectée)

La Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250) est ensuite utilisée pour visualiser les noyaux des cellules. La lame colorée par IHC est recouverte et la coupe d'échantillon FFPE est examinée à l'aide d'un microscope optique.

## Résultats attendus

La spécificité et l'utilisation prévue de cet anticorps ont été validées par le biais d'une coloration IHC sur le Tissue-Tek Genie Advanced Staining System au moyen de coupes d'échantillon FFPE de cellules normales et tumorales.

Une coloration cytoplasmique granulaire est observée dans un sous-ensemble de lymphocytes de la région des lymphocytes T des amygdales, de la rate et du thymus normaux. Une coloration positive est également observée dans les lymphocytes dispersés du foie, de l'utérus et des reins. Aucune coloration positive n'est observée dans les poumons, la peau, les muscles, l'estomac, l'œsophage, l'hypophyse, les seins, la prostate et le cerveau. La coloration cytoplasmique granulaire est observée dans de nombreux exemples de lymphomes de Hodgkin, de leucémies à tricholeucocytes, de lymphomes T et d'ALCL sélectif.

La sensibilité et l'identification de la protéine TIA-1 par cet anticorps peuvent être affectées par une mauvaise manipulation des échantillons. Cela peut altérer l'antigénicité, affaiblir la détection et générer de faux résultats négatifs.

Modèle de coloration cellulaire : cytoplasmique granulaire

Échantillon témoin positif : amygdales, rate et cas particuliers d'ALCL

## Mises en garde et avertissements

Réservé à un usage professionnel. Prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation. Éviter tout contact des réactifs avec les yeux, la peau et les muqueuses. Porter des gants et des vêtements de protection, ainsi qu'une protection des yeux/du visage.

Les capsules remplies d'anticorps prédilués prêts à l'emploi sont à usage unique. Ne pas essayer de les

remplir ou d'ajouter du réactif. Jeter la capsule après utilisation.

Les cartouches remplies d'anticorps prédilués prêts à l'emploi sont destinées à des utilisations multiples. Ne pas essayer de les remplir ou d'ajouter du réactif. Jeter la cartouche lorsqu'elle est vide.

Il est recommandé d'inclure des témoins appropriés sur chaque lame d'échantillon pour faciliter l'identification de tout écart susceptible de se produire pendant le processus de coloration.

Toutes les pratiques de mise au rebut doivent être conformes à l'ensemble des lois et des réglementations fédérales, régionales et locales. Reportez-vous à la FDS pour plus d'informations.

## Conditions de stockage

Conservez ce produit à une température comprise entre 2 et 8 °C.

## Instructions d'utilisation

Tissue-Tek Genie® anti-TIA-1 Mouse Monoclonal Antibody [2G9A10F5], capsules (REF 8254-C010) :

1. Attachez la Tissue-Tek Genie® Reagent Dispensing Area Tag (RDA-Tag) sur la capsule dans la RDA.
2. Poussez la capsule dans la RDA avec le côté film vers le bas et clipsez la plaque RDA attachée pour la mettre en place sur la RDA.
3. Placez la RDA sur la station souhaitée du Tissue-Tek Genie Advanced Staining System.
4. Placez la lame avec la coupe d'échantillon sur la même station, côté coupe d'échantillon vers le bas.
5. Attribuez le protocole 8254 à la même station.
6. Lancez l'exécution du protocole 8254.
7. La plaque RDA 8254 sera scannée et enregistrée automatiquement lorsque le processus de coloration sera lancé.
8. Au cours de l'étape d'application de l'anticorps primaire, l'anticorps sera libéré de la capsule dans la RDA et sur la coupe d'échantillon de la lame.
9. Le protocole de coloration continue jusqu'à la fin.

Tissue-Tek Genie® anti-TIA-1 Mouse Monoclonal Antibody [2G9A10F5], cartouche (REF 8254-M250) :



1. Avant de placer la cartouche sur le carrousel du Tissue-Tek Genie Advanced Staining System, amorcez la cartouche en orientant la buse vers le bas et en pinçant doucement la tubulure de la buse jusqu'à ce qu'elle soit remplie de réactif.
2. Placez la cartouche sur le carrousel.
3. Clipsez la plaque RDA 8254 pour la mettre en place sur la RDA.
4. Placez la RDA sur la station souhaitée du Tissue-Tek Genie Advanced Staining System.
5. Placez la lame avec la coupe d'échantillon sur la même station, côté coupe d'échantillon vers le bas.
6. Attribuez le protocole 8254 à la même station.
7. Lancez l'exécution du protocole 8254.
8. La plaque RDA 8254 et la cartouche seront scannées et enregistrées automatiquement lorsque le processus de coloration sera lancé.
9. Au cours de l'étape d'application de l'anticorps primaire, l'anticorps sera distribué de la cartouche dans la RDA et sur la coupe d'échantillon de la lame.
10. Le protocole de coloration continue jusqu'à la fin.

Matériel requis, mais non fourni

Les réactifs suivants peuvent être nécessaires pour la coloration, mais ne sont pas fournis :

- Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (REF 8865-G001)
- Tissue-Tek Genie® Wash Solution (REF 8874-G004)
- Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744-G001)
- Tissue-Tek Genie® Non-Immune Mouse Ig Antibody, Negative Control (REF 8604-C010, 8604-M250)
- Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826-K250)
- Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250)

Vous trouverez de plus amples informations sur le site web de Sakura Finetek USA à l'adresse [www.sakura.com/Genie](http://www.sakura.com/Genie).

## Informations relatives à la commande

Code produit, nom du produit et quantité (REF) 8254-C010 Tissue-Tek Genie® anti-TIA-1 Mouse Monoclonal Antibody [2G9A10F5], prêt à l'emploi, 10 capsules ; 1 paquet.

(REF) 8254-M250 Tissue-Tek Genie® anti-TIA-1 Mouse Monoclonal Antibody [2G9A10F5], prêt à l'emploi, 250 tests, 1 cartouche ; 1 unité.

REMARQUE : La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible en ligne sur le site web de Sakura Finetek USA à l'adresse [www.sakura.com/SDS.html](http://www.sakura.com/SDS.html).

## Références









1. Mori N, et al. Modern Pathology 2004; 17: 840-846.
2. Felgar RE, et al. Am J Pathol. 1997; 150:1893-1900.
3. Medley QG, et al. Proc Natl Acad Sci 1996;93:685-689.
4. Kanavaros P, et al. Anticancer Res. 1999; 19: 1209-1216.
5. Hatano B, et al. Histopathology 2002; 41: 421-436.


## Contact

Pour les États-Unis, contactez Sakura Finetek USA, Inc. en appelant gratuitement le **1-800-725-8723** ou contactez un représentant ou distributeur agréé Sakura Finetek.

En dehors des États-Unis, contactez le représentant ou distributeur agréé Sakura Finetek le plus proche. Les coordonnées sont précisées sur le site [www.sakura.com](http://www.sakura.com).

## Symboles

	Numéro de catalogue
	Code de lot
	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Limitation de température
	Utilisé par
	Fabricant
	Consultez les instructions d'utilisation
	Conformité européenne
	Représentant agréé dans la Communauté européenne

Stockage : 2 °C  8 °C



	Sakura Finetek USA, Inc. 1750 W 214 <sup>th</sup> Street Torrance, CA 90501 U.S.A.
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Pays-Bas
Fabriqué aux États-Unis	

GS-33406 Rév. A