

Tissue-Tek Genie®

anti-TdT Rabbit Monoclonal Antibody [RM379]

Gebrauchsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zur Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik.

Tissue-Tek Genie® anti-TdT Rabbit Monoclonal Antibody [RM379] wurde für die qualitative Feststellung des Proteins Tdt in formalinfixierten, paraffineingebetteten (Formalin-Fixed, Paraffin Embedded, FFPE) Gewebeschnitten mithilfe immunhistochemischer Färbung (IHC) unter Verwendung des Tissue-Tek Genie® Advanced Staining System entwickelt. Die klinische Interpretation muss in Verbindung mit einer histologischen Untersuchung, unter Berücksichtigung klinischer Informationen, anderer diagnostischer Tests sowie der Überprüfung der entsprechenden Kontrollmechanismen durch einen qualifizierten Pathologen erfolgen.

Einschränkungen

Dieses Produkt ist optimiert für die Verwendung gemäß Standardprotokoll für diesen Antikörper auf dem Tissue-Tek Genie Advanced Staining System und die Verwendung von Tissue-Tek Genie® Reagenzien und FFPE-Gewebeschnitten. Die Färbequalität kann bei der Verwendung mit anderen Systemen und/oder Reagenzien gemindert sein.

Zusammenfassung und Prinzip

Die Terminale Desoxyribonukleotidyltransferase (TdT) ist ein Enzym, das Deoxynukleotide polymerisiert. Es erzeugt die Diversität des Antigen-Rezeptors an den Verbindungen umgeordneter schwerer Ketten und Gensegmente des T-Zell-Rezeptors. Die Expression

des Proteins terminale Desoxyribonukleotidyltransferase erfolgt normalerweise in B-Vorläuferzellen und T-Vorläuferzellen von Lymphoblasten/Lymphoiden. Die TdT-Expression kann auch gelegentlich in Mandeln, Lymphknoten und extranodalem Lymphgewebe auftreten. Der anti-TdT-Antikörper ist nützlich zur Klassifizierung von malignen Lymphomen und akuten Leukämien, insbesondere zur Identifizierung von Vorläuferlymphomen, wie z. B. lymphoblastische Leukämie/Lymphom und T-lymphoblastische Leukämie/Lymphom, wenn er in einem Panel von Antikörpern verwendet wird.

Tissue-Tek Genie anti-TdT Rabbit Monoclonal Antibody [RM379] ist ein primärer Antikörper gegen das menschliche TdT-Protein und wird in gepufferter Salzlösung mit 1 % Rinderserumalbumin und 0,09 % Natriumazid bereitgestellt. FFPE-Gewebeschnitte werden auf positiv geladenen Objektträgern platziert und mithilfe der Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (REF 8865-G001) entparaffiniert. Danach erfolgt eine hitze-induzierte Epitop-Demaskierung mittels Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744-G001).

Der immunhistochemische (IHC) Nachweis von TdT in FFPE-Gewebeschnitten erfolgt durch die Anwendung von Tissue-Tek Genie anti-TdT Rabbit Monoclonal Antibody [RM379] und dem Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826-K250). Dieses Verfahren umfasst das sequentielle Aufbringen der Antikörper und der Bestandteile des Kits wie im Folgenden dargelegt:

- Tissue-Tek Genie® Protein Block

- Tissue-Tek Genie® anti-TdT Rabbit Monoclonal Antibody [RM379]
- Tissue-Tek Genie® Peroxidase Block
- Tissue-Tek Genie® Link (bindet an den primären Antikörper)
- Tissue-Tek Genie® Polymer HRP-Conjugate (bindet an das Link-Reagenz)
- Tissue-Tek Genie® DAB Substrate (zur Visualisierung von detektierten Proteinen)

Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250) dient anschließend zur Visualisierung der Zellkerne. Der immunhistochemisch gefärbte Objektträger wird mit Folie eingedeckt, und der FFPE-Gewebeschnitt wird unter dem Lichtmikroskop untersucht.

Erwartete Ergebnisse

Spezifität und Verwendungszweck dieses Antikörpers wurden mittels IHC-Färbung unter Verwendung des Tissue-Tek Genie Advanced Staining System mit FFPE-Gewebeschnitten von normalem und Tumor-Gewebe validiert.

Zellkern-Färbung wurde beobachtet in kortikalen Thymozyten des Thymus und zerstreuten perisinusoidalen Lymphozyten in der interfollikulären Zone ausgewählter Mandeln. Eine Färbung wurde in reifen T-Zellen und B-Zellen der Mandeln und in den meisten medullären Thymozyten des Thymus beobachtet. Eine nukleare Färbung neoplastischer Zellen der lymphoblastischen Leukämie/Lymphom und des Thymoms B wurde beobachtet. Eine nukleare Färbung neoplastischer Zellen reifer Lymphome wurde nicht beobachtet.

Die Testempfindlichkeit und Identifikation des TdT-Proteins durch diesen Antikörper kann durch unsachgemäße Handhabung der Gewebeprobe beeinflusst werden. Dies kann eine Veränderung der Antigenität bewirken, die Erkennung schwächen und zu falsch negativen Diagnosen führen.

Zelluläres Färbemuster: nuklear

Positive Gewebe-Kontrolle: Thymus, Thymom, ausgewählte Mandeln

Vorsichts- und Warnhinweise

Nur für den professionellen Einsatz. Treffen Sie bei der Handhabung die entsprechenden angemessenen Vorkehrungen. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen dem Reagenz und den Augen, der Haut und den Schleimhäuten. Tragen Sie Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz.

Kapseln mit gebrauchsfertigen, vorverdünnten Antikörpern zum Einmalgebrauch. Versuchen Sie nicht, diese neu zu befüllen oder zusätzliche Reagenzien hinzuzufügen. Kapsel nach Gebrauch entsorgen.

Kartuschen mit gebrauchsfertigen, vorverdünnten Antikörpern können für mehrere Anwendungen genutzt werden. Versuchen Sie nicht, diese neu zu befüllen oder zusätzliche Reagenzien hinzuzufügen. Kartusche entsorgen, wenn sie leer ist.

Es wird empfohlen, angemessene Kontrollen auf jedem Gewebeprobe-Objektträger vorzusehen, um die Erkennung jeglicher Abweichungen zu erleichtern, die im Verlauf des Färbeprozesses auftreten könnten.

Alle Entsorgungsverfahren müssen sämtliche geltenden föderalen, staatlichen und örtlichen Vorschriften erfüllen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (Safety Datasheet, SDS).

Lagerbedingungen

Dieses Produkt ist bei 2 bis 8 °C aufzubewahren.

Gebrauchsanleitung

Tissue-Tek Genie® anti-TdT Rabbit Monoclonal Antibody [RM379], Kapseln (REF 8406-C010):

1. Legen Sie das an der Kapsel angebrachte Tissue-Tek Genie® Reagent Dispenser Area Tag (RDA-Tag) in den Dispenser.
2. Drücken Sie die Kapsel mit der Folienseite nach unten in den Dispenser und klicken Sie das befestigte RDA-Tag nach unten in den Dispenser.
3. Platzieren Sie den Dispenser auf der gewünschten Station des Tissue-Tek Advanced Staining System.
4. Platzieren Sie den Objektträger mit dem Gewebeschnitt nach unten auf derselben Station.
5. Weisen Sie dieser Station Protokoll 8406 zu.
6. Starten Sie die Ausführung von Protokoll 8406.

7. Wenn der Färbeprozess beginnt, wird das RDA-Tag 8406 automatisch registriert und gescannt.
8. Während des Auftragens des primären Antikörpers wird der Antikörper aus der Kapsel in den Dispenser freigesetzt und auf den Gewebeschnitt am Objektträger aufgetragen.
9. Das Färbeprotokoll wird bis zum Ende ausgeführt. Tissue-Tek Genie® anti-TdT Rabbit Monoclonal Antibody [RM379], Kartusche (REF 8406-M250):
 1. Bevor Sie die Kartusche im Karussell des Tissue-Tek Genie Advanced Staining System platzieren, bereiten Sie die Kartusche vor, indem Sie sie mit der Düse nach unten ausrichten und vorsichtig auf den Düsenschlauch drücken, bis der Schlauch mit dem Reagenz gefüllt ist.
 2. Platzieren Sie die Kartusche am Karussell.
 3. Klicken Sie das RDA-Tag 8406 in den Dispenser.
 4. Platzieren Sie den Dispenser auf der gewünschten Station des Tissue-Tek Advanced Staining System.
 5. Platzieren Sie den Objektträger mit dem Gewebeschnitt nach unten auf derselben Station.
 6. Weisen Sie dieser Station Protokoll 8406 zu.
 7. Starten Sie die Ausführung von Protokoll 8406.
 8. Wenn der Färbeprozess beginnt, werden das RDA-Tag 8406 und die Kartusche automatisch registriert und gescannt.
 9. Während des Auftragens des primären Antikörpers wird der Antikörper aus der Kartusche in den Dispenser abgegeben und auf den Gewebeschnitt am Objektträger aufgetragen.
 10. Das Färbeprotokoll wird bis zum Ende ausgeführt.

Benötigte, aber nicht im Lieferumfang enthaltene Materialien

Die folgenden Reagenzien können für die Färbung erforderlich sein, sind jedoch nicht im Lieferumfang enthalten:

- Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (REF 8865-G001)
- Tissue-Tek Genie® Wash Solution (REF 8874-G004)
- Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744-G001)

- Tissue-Tek Genie® Non-Immune Rabbit Ig Antibody, Negativkontrolle (REF 8605-C010, 8605-M250)
- Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826-K250)
- Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250)

Weitere Informationen finden Sie auf der US-amerikanischen Website von Sakura Finetek unter www.sakuraus.com/Genie

Bestellinformationen

Artikelnummer Produktbezeichnung und Menge

REF 8406-C010 Tissue-Tek Genie® anti-TdT Rabbit Monoclonal Antibody [RM379], gebrauchsfertig, 10 Kapseln, 1 Packung.

REF 8406-M250 Tissue-Tek Genie® anti-TdT Rabbit Monoclonal Antibody [RM379], gebrauchsfertig, 250 Tests, 1 Kartusche, 1 Einheit.

HINWEIS: Das Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet, SDS) ist online auf der US-amerikanischen Website von Sakura Finetek unter www.sakuraus.com/SDS.html verfügbar.

Literatur

1. Kang LC, et al. Arch Pathol Lab Med. 2006; 130:153-157.
2. Valmary S, et al. Ann Pathol. 2005; 25:25-3.
3. Strauchen JA, et al. Int J Surg Pathol. 2003; 11:21-24.
4. Strauchen JA, et al. Am J Clin Pathol. 2001; 116:12-16.

Kontakt

In den Vereinigten Staaten können Sie Sakura Finetek USA unter der Telefonnummer **1-800-725-8723** kostenlos anrufen oder Ihren Sakura-Finetek Außendienstmitarbeiter oder einen autorisierten Händler kontaktieren.

Außerhalb der Vereinigten Staaten wenden Sie sich bitte an den nächsten Sakura-Finetek-Außendienstmitarbeiter oder an einen autorisierten Händler. Kontaktangaben finden Sie unter www.sakura.com

Symbole

-  Katalognummer
-  Chargen-Code
-  Medizinprodukt für die *in-vitro*-Diagnostik
-  Temperaturbegrenzung
-  Haltbarkeitsdatum
-  Hersteller
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Europäische Konformität
-  Autorisierter Vertreter in der Europäischen Union

Lagerung: 2 °C  8 °C



	Sakura Finetek USA, Inc. 1750 W 214 th Street Torrance, CA 90501 USA
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Niederlande
Made in USA	

GS-33424 Rev. A